

Bruksanvisning PennyTalks merkepenn



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund

Dette ligger i esken:

- **Merkepenn PennyTalks**
- **Strømforsyning (ikke ladefunksjon)**
- **2 stk. AAA batterier**
- **Ørebøyle**
- **Snor for å henge merkepennen rundt halsen**
- **Selvklebende, runde taktile etiketter (160 stk.)**
- **Myke, selvklebende avlange etiketter for merking av tekstiler (tåler maskinvask og tørketrommel, 72 stk.)**
- **Skjema for valg av språk. PennyTalkes er programmert til norsk. Kan endres ved å berøre annet språk med Sensoren**

Funksjonenes plassering:

Legg pennen på bordet med den spisse enden mot deg og feltet med knapper opp.

På toppen av pennen, lengst fra deg, er Høyttaleren.

Nedenfor, øverst i det nedsenkede feltet, er det en firkantet, grønn diode som blinker når pennen er slått på.

Knappen nedenfor, merket med ett taktilt punkt, er På/ av-knappen

Nedenfor på/ av-knappen finner du en knapp med to taktile punkter. Denne har to funksjoner. Den er både Talestyrke opp og Opptaksknapp. Den er merket med et plusstegn.

Nederst i det nedsenkede feltet finner du knappen med tre taktile punkter.

Denne har også to funksjoner, Talestyrke ned og Opptaksknapp. Den er merket med et minustegn.

Helt nederst på den spisse enden sitter Sensoren som leser etikettene.

Øverst på venstre side er en firkant med et hull i midten. Det er tilkoblingen til den medfølgende strømforsyningen.

Øverst på høyre side er en firkant med et hull i midten. Det er tilkoblingen til ørebøylen.

Batteridekslet sitter på pennens bakside. Det åpnes ved å plassere fingeren i utsparingen omtrent midt på baksiden og trekke opp. Batterienes polarisering er negativ-enden mot fjær.

Slå på/ slå av:

Sett i batteriene. Trykk og hold nede På/ av-knappen i 3 sekunder. Talestøtten sier om pennen er på eller av. Hvis pennen ikke er i bruk, vil den slå seg automatisk av etter 60 sekunder.

Å spille inn på en etikett:

1. Sett pennens Sensor (den spisse enden) mot etiketten til den sier «dette er en ny etikett».
2. Trykk og hold inne enten Pluss-tasten eller Minus-tasten (de som er merket med 2 eller 3 taktile punkter) inntil du hører «spill inn nå».
3. Fortsett å holde inne knappen mens du leser inn beskjedene.
4. Når opptaket er ferdig, slippes knappen.
5. Din innspilling er nå gjort og du får beskjedene «innspillingen er ferdig».

Volum:

Trykk på Pluss- eller Minusknappen for å øke eller senke lydstyrken.

Avspilling:

Hold Sensoren mot etiketten. Innspillingen vil nå bli opplest.

Slette en innspilling:

1. Berør etiketten med Sensoren.
2. Pennen starter avspillingen.
3. Trykk og hold inne både Pluss- og Minustasten til du får beskjedene «slettet».

Kapasitet:

Standard minnekort som medfølger: ca. 2.700 innspillinger.

Største compatible minnekort: ca. 90.000 innspillinger

Ring Adaptor Hjelpemidler hvis du trenger flere etiketter

Viktig!

Innspillingene på merkepennen lagres på et micro SD-kort. Dette sitter under batteriene. Hvis din merkepenn blir ødelagt, kan du ta ut minnekortet og sette det over i en ny minnepenn. Du har da beholdt dine innspillinger.

Synshjelpemidler A/S

Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten

0354 Oslo

Tlf. 23 21 55 55